

印象用トレーの清掃に強い味方。
溶解力、防錆力、除菌効果をそなえました。



NET WT.1kg 2,400円 (税別・希望小売価格)

NEW

アルギン酸塩印象材用清掃材

ULTRA
TRAY CLEANER

ニューウルトラトレークリーナー

サリチル酸配合

NEW

アルギン酸塩印象材用清掃材

ULTRA TRAY CLEANER

ニューウルトラトレークリーナー

サリチル酸配合

アルギン酸塩印象材の付着したトレーが簡単キレイに清掃できるトレークリーナーです。

ニューウルトラトレークリーナーの特長

防錆力

防錆剤配合により、清掃後の金属トレーのサビや腐食を抑制し、トレーの美しさを持続させます。

<材質試験>

各試験片を使用濃度（4%水溶液）のトレークリーナーに浸漬した。

	浸漬前		1日後	
アルミ		-		-
黄銅		-		-
銅		-		-
SUS304		-		-
SUS430		-		-
スズ合金 トレー		-		-
メッキタイプ トレー		-		-

評価 ++: 著しい腐食あり +: 腐食あり
±: 僅かな腐食あり -: 腐食なし

溶解力

トレーに付着したアルギン酸塩印象材をしっかりと清掃。



浸漬前

↓ 1日浸漬後



浸漬後

清掃後はしっかり除菌で安心

新しくサリチル酸を配合。清掃後の除菌効果をプラスし、トレーを清潔に保ちます。

<除菌効果>



使用法

1. 温水 1 L に本品約 40 g（封入の計量スプーン約 1 杯分）を溶かす。
2. アルギン酸塩印象材が付着したトレーは、あらかじめ大きなかたまりを取り除いてから溶液に浸漬する。
3. 付着物の軟化したトレーは、必要に応じてブラシがけすると、一層速やかに清掃できる。
4. 清掃後はトレーを十分に水洗してから水気をよく拭き取る。

使用前には製品の注意事項をよくお読みください。

〈発売元〉 High Technology & Sincerity

⊕ 太平化学産業株式会社

本 社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル5F TEL.03-6206-2203
URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>

●お問合せは