

血液凝固防止剤

タイフレッシュ・ ファーストクリーナー



500ml 業務用
1,150円(税別・希望小売価格)


血液・タンパク等の凝固を防ぎ、洗浄作業をスムーズに
汚染した医療器具に付着した血液・タンパク等の乾燥凝固を防ぎ、洗浄作業を簡単にする血液凝固防止剤です。中性タイプで幅広い材質にしようできます。

特徴

- ◇スプレー後長時間放置しても、血液・タンパク等の乾燥凝固を防ぎ、洗浄作業を簡単にします。
- ◇スプレーミストが大きくなるトリガーを採用し、飛散しにくくなっています。
- ◇中性タイプで幅広い材質に使用できます。
- ◇スプレー後の器具をそのまま一次洗浄できます。

- 成分 湿潤剤・界面活性剤・血液凝固防止剤・金属腐食防止剤・防腐剤
- 性状 外観:微黄色透明液体 液性:中性(原液)

血液凝固防止剤 タイフレッシュ・ファーストクリーナー

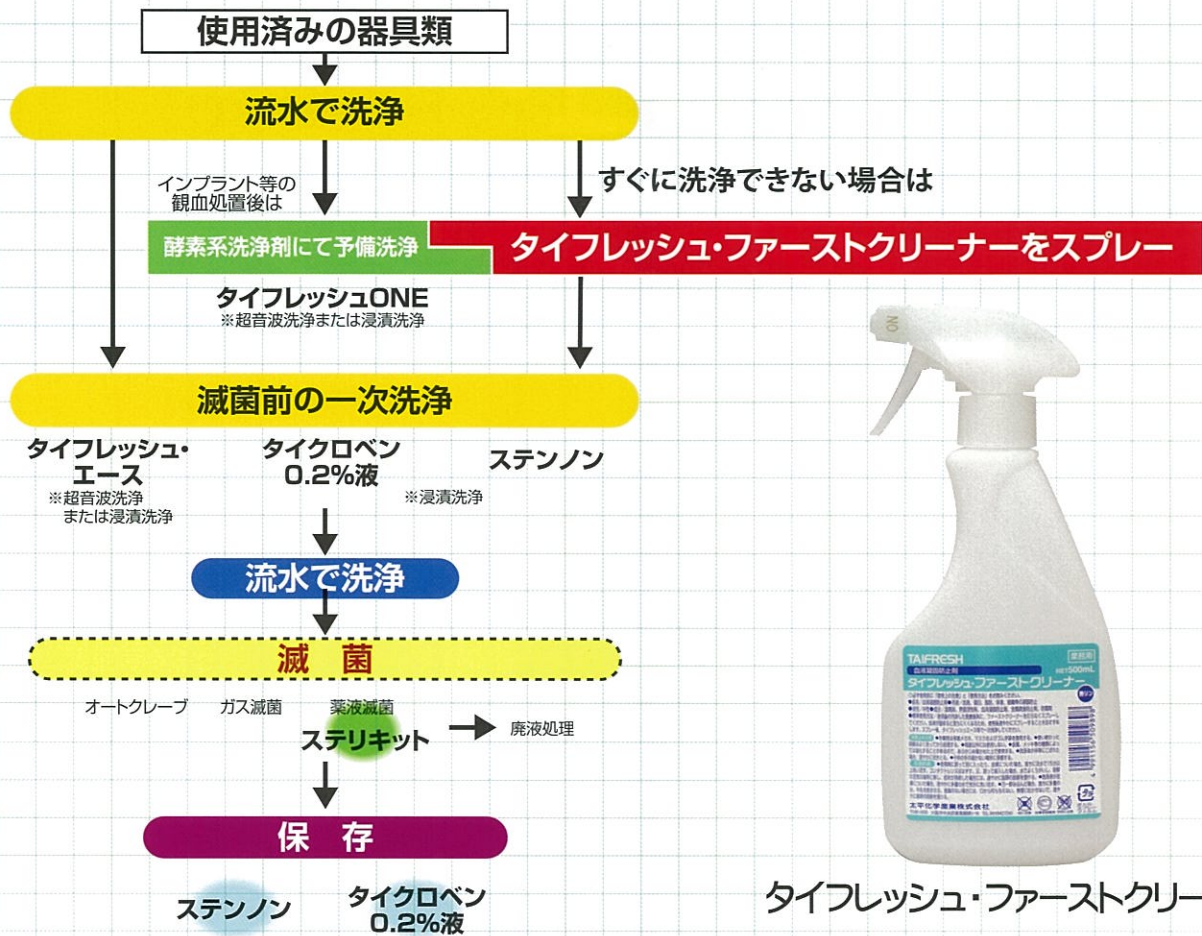

タイフレッシュ・ファーストクリーナー

【乾燥血液への効果】

【実験方法】


- ①デンタルミラーに20 μ L塗布し、1時間乾燥した。
- ②汚れが濡れるように十分量の水道水または洗浄剤を噴霧し、1時間放置した。
- ③水道水に5分間浸漬後、すすいだ。
- ④脱塩水を通し、乾燥させた。



〈1時間乾燥後、洗浄前〉



〈噴霧1時間後〉

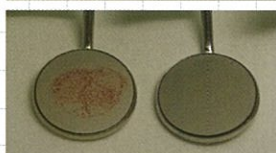

〈水洗後〉

左水道水噴霧 右ファーストクリーナー噴霧

【材質実験】ファーストクリーナーに3日間浸漬



銅板



ステンレス板



アルミ板



黄銅板



スチールバー

●お問い合わせは

〈販売元〉

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241
支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>