


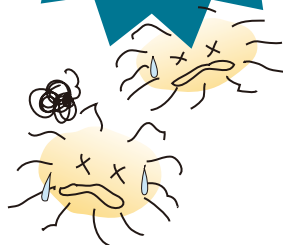

- 堆積したしつこい歯石を**短時間に溶解除去**します。
- 特殊界面活性剤**がヌメリも同時に徹底洗浄。
- レジン床やクラスプ類を傷めません。
- 除菌**にも優れた効果を発揮します。



NET 2.0L (減容化容器)

義歯の洗浄に強力な効果！
 歯石や粘着物を素早く溶解除去します。
デンチャーピュア・プロ

歯科補綴物への
 影響が軽微な

酸性
 タイプ

歯科医院・技工所用義歯洗浄液

Denture Pure Pro

デンチャーピュア・プロ

特殊界面活性剤配合

Denture Pure Pro


歯科医院・技工所用義歯洗浄液

デンチャーピュア・プロ
特殊界面活性剤配合


歯石とヌメリを短時間に溶解除去。
除菌効果にも優れた新しい義歯洗浄液です。

デンチャーピュア・プロの特長

- 落ちにくい頑固な歯石を除去します。
- 義歯溶解力に優れ、レジン床やクラスプ類を傷めません。
- 義歯についたヌメリもなくなります。
- 除菌にも優れた効果を発揮します。

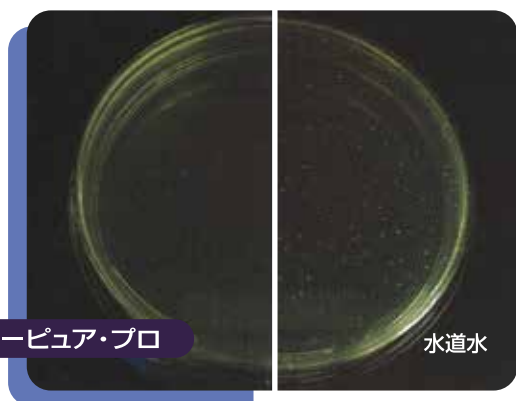

義歯の洗浄液を24時間培養

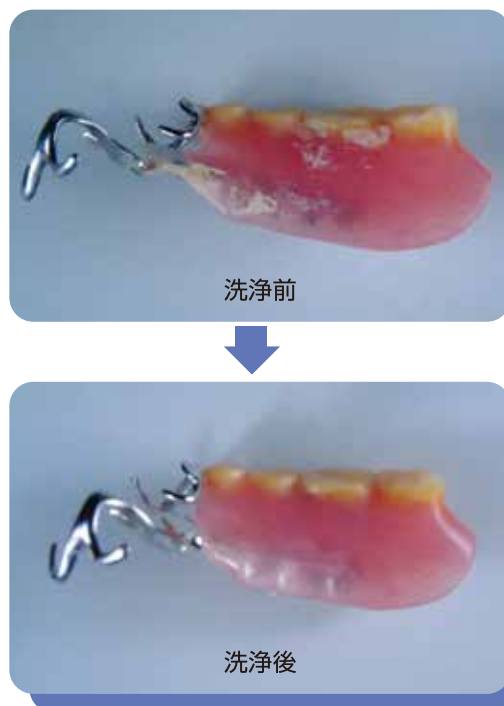

用途

義歯、その他補綴物(矯正用リテーナー、マウスガード、スプリントなど)の洗浄

使用方法

1. フタ付きのガラス容器に、義歯が完全に浸漬するように必要量を取ります。
総義歯1個に対し100mlを目安とし、希釈せずに原液で使用します。液は毎回交換してください。
2. 超音波洗浄器で5~10分間洗浄します。機械の出力や義歯の汚れ具合により時間を調整してください。
3. 義歯を取り出し流水で充分洗浄します。表面にキズ等のある場合、清水で超音波洗浄してください。

使用上の注意

- ・長時間浸漬をすると、銀含有率の高い金属などは変色する場合があります。
- ・作業時は保護メガネおよび炊事用ゴム手袋を着用してください。
- ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。塩素系の製品と一緒に使うと塩素ガスが出て危険です。
- ・用途以外には使用せず、子供の手の届かないところに直射日光を避けて保管してください。

製造発売元

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2
MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>