




超音波洗浄器専用 義歯洗浄液

Denture Stain Pro

プロだからできる、この洗浄力！

-  短時間で義歯の着色を除去！
-  除菌もできる！
-  試適後の補綴物の除菌洗浄にも！

着色除去

除菌



洗浄前




洗浄後



How to use

STEP1

本剤1：水2

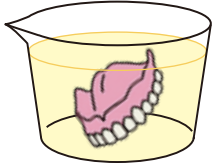

本剤を水で3倍に希釈し洗浄物を浸します。

フタ付ガラス容器をご使用ください!!



STEP2



5～10分間超音波洗浄をします。

汚れに応じて時間を調節して下さい!



STEP3



容器から取出し充分に水洗いをします。

臭いが気になる場合は超音波洗浄して下さい!



STEP4



液は毎回交換して下さい。

歯石除去には



デンチャーピュア・プロ
ご使用下さい!!

ご使用前に製品の注意事項をよくお読みください。

《販売元》

High Technology & Sincerity

Ⓣ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241

支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2

MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>