

次亜塩素酸系除菌洗浄剤（固定剤配合）

IMPROSTERIN+ インプロステリン^{プラス}

除菌も固定もこれ1本！



アルジネート印象材の「除菌」と「固定」に！

※シリコン印象材にも使用可能！



1液濃縮タイプで溶液の調製が簡単！



防錆成分配合で金属トレーの腐食防止！

How to use

印象採得後、流水洗浄



水道水で軽く水洗いします。




除菌・固定・洗浄

インプロステリンプラス20倍
希釈液に浸漬します。

流水洗浄後、石膏注入

じゅうぶんに水洗いした後、
印象に石膏を注入します。

洗浄力評価

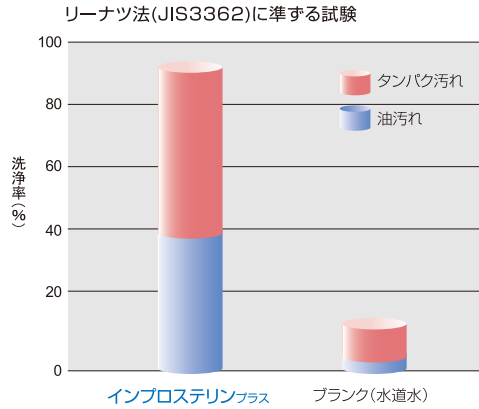

除菌力 (有効塩素 1000ppm)

印象材を10分間処理後、培養




印象固定評価 1

ニッシン社製のADA規格No.2試験体MOD支台模型を利用し、基準となるインレー体を製作した。アルジネート印象材を使用しMOD支台模型の印象を採得、この印象をインプロステリンプラス20倍希釈液に1時間および3時間浸漬させた。対照として、採得後の印象を保湿箱に1時間および3時間静置した。所定時間経過後の印象に石膏を注入し、インレー体との適合の状況を確認した。

	インプロステリンプラス 1時間浸漬	インプロステリンプラス 3時間浸漬	保湿箱 1時間静置	保湿箱 3時間静置
横から				
上から				

印象固定評価 2

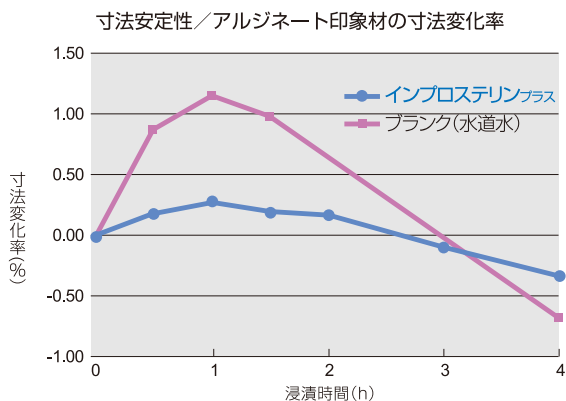

使用方法の注意点

- ・使用濃度 20倍希釈
- ・浸漬時間10分以上(3時間以内)
- ・使用液は毎日交換
- ・フタ付きの容器をご使用ください。
- ・溶液は用事調製します。

※白い浮遊物が発生することがありますが性能には影響ございません。

使用前に製品の注意事項をよくお読みください。

《発売元》

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本 社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241

支 店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>

《製造元》 株式会社 アルボース