

業務用



器具の動きをなめらかにし、 しっかりコーティング。

タイフレッシュ・スムーズは、医療器具の保守を目的として開発された粘性の低いミルク状の水溶性無リン防錆潤滑剤です。短時間の浸漬で器具表面に薄い被膜を形成し、器具関節部の作動をなめらかにすると共に防錆処理が行えます。



折りたんで捨てられる
減容ボトルを採用。


2L 6,500円
(税別、希望小売価格)

界面活性剤、流動パラフィン
水溶性防錆潤滑剤

TAI FRESH

S M O O T H

水溶性防錆潤滑剤 タイフレッシュ・スムーズ

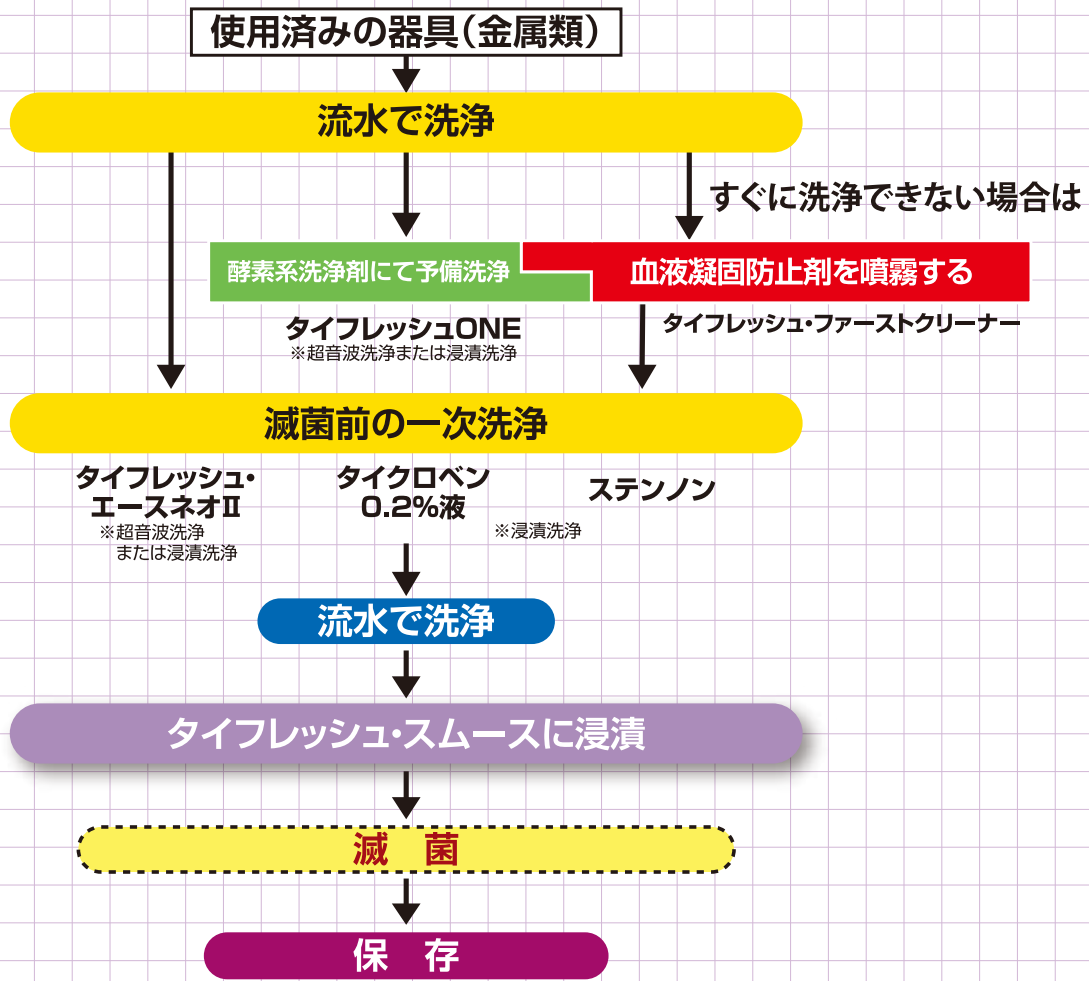

【材質試験】 試験方法: 鉄、アルミ、真鍮、銅を5%液に25°Cで7日間浸漬

	鉄	アルミ	真鍮	銅
脱塩水	++	-	-	-
タイフレッシュ・スムーズ 5%液	-	-	-	-

評価: ++: 著しい腐食あり +: 腐食あり ±: 僅かな腐食あり -: 腐食なし

【潤滑性】 (静摩擦係数(μ))

試験方法:

- SUS410Sを脱塩水で5%に希釈した薬液に浸漬し、110°Cで30分乾燥させた。
- 脱塩水のみでも1と同様の処理を施した。
- 摩擦摩耗試験機にて、銅(SUJ2)とSUS410Sを擦り合わせ、摩擦係数を測定した。

脱塩水	タイフレッシュ・スムーズ 5%液
0.351	0.103

【使用方法】

- 浸漬洗浄後、20倍希釈液に10~30秒浸漬後、よく液切をして乾燥させます。
- ウォッシャーディスインフェクターでご使用の場合(すすぎの水に使用)は機器の使用方法に準ずる。50~200倍希釈液(最適濃度100倍希釈液)
- (注意)希釈される前によく振り混ぜてご使用下さい。液切が不十分な場合、器具に斑点が残る場合があります。斑点が生じた場合は溶剤で清拭すると除去できます。希釈液は使用頻度にもよりますが、通常1週間使用できます。

【使用上の注意】

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- 容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付くおそれがある。
- 他の薬剤、洗浄剤等とは混ぜない。
- 他の容器に移し替える場合は、洗浄で乾燥した専用のプラスチック容器にその商品名、使用方法、注意事項を明記した上で使用する。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 用途以外には使用しない。
- 子供の手の届かないところに保管する。
- 凍結すると融解時分離を起こしますので、冬季あるいは寒冷時保存は注意すること。

《販売元》

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241
支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2

MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>

●お問い合わせは